



Empfehlung für alternative Abstrich-Systeme zur Covid-19 Diagnostik

Aufgrund des weltweiten Engpasses von Abstrich-Systemen (ESwab™ oder UTM®) für die Covid-19 Diagnostik empfehlen wir folgende alternative Lösungen:

1. cobas® PCR Media Uni Swab Sample Kit oder cobas® PCR Media Dual Swab Sample Kit
Bestell-Nr.: ROCHE 07 958 030 190 Bestell-Nr.: ROCHE 07 958 021 190



2. Im Notfall (vorgegebene Abstrich-Systeme sind nicht verfügbar) kann ein Abstrichtupfer in Kochsalzlösung verwendet werden:

Erforderliche Materialien:

- Abstrichtupfer, steril einzeln verpackt (Kunststoff)
Bestell-Nr.: COPAN 502CS01
- 7ml Röhrenchen mit Schraubverschluss (82x13mm, PP, mit beiliegendem Verschluss)
Bestell-Nr.: SARSTEDT 60.550.100
- Physiologische NaCl-Lösung (steril) Analytische Qualität!



Vorbereitung:

Jeweils 1ml der physiologischen NaCl-Lösung unter sterilen Bedingungen (unter einer Werkbank mit Handschuhen!) in das Röhrenchen füllen und sorgfältig verschließen.

Gebrauch:

- Analog dem System des ESwab™
- Beschriftung (Name, Vorname, Geburtsdatum) mit wasserfestem Stift!

Ihr Team des Instituts für Hygiene
(Stand: 19.03.2020)